



# CHECK LIST

## per la gestione del campione di sangue

1

### PRIMA DELLA RACCOLTA

#### Controllo della documentazione da allegare al campione e della scadenza kit:

- Compilare il consenso informato con i dati del paziente e del clinico, e verificare la corretta apposizione della firma del paziente.
- Controllare la data di scadenza delle provette.
- Apporre le etichette presenti nel kit sulle provette e sul consenso informato da inviare al laboratorio.



3

### PRIMA DELLA SPEDIZIONE

#### Etichettatura dei campioni:

- Al fine di permettere il controllo della tracciabilità dei campioni utilizzare esclusivamente le scatole originali in dotazione, e verificare che la scatola e le etichette apposte sui contenitori dei campioni siano corrispondenti.



2

### RACCOLTA DEL CAMPIONE

- Prelevare il campione di sangue periferico e riempire le provette in dotazione nel kit (1 per Real-Time PCR e 2 per NGS) fino a riempimento automatico, circa 10 ml.
- Agitare delicatamente invertendo ripetutamente (almeno 10 volte).
- Stoccaggio inferiore a 24 ore: conservare i campioni a temperatura ambiente (min 15 °C, max 25 °C).
- Stoccaggio superiore a 24 ore: conservare i campioni in frigorifero (4 °C).



4

### PREPARAZIONE DEI CAMPIONI PER LA SPEDIZIONE

- Inserire le provette all'interno della busta biohazard in dotazione, alloggiare nell'apposito spazio all'interno della spugna.
- Se presente il gel pack, è necessario avvolgere le provette nel gel pack e successivamente alloggiarle nell'apposito spazio. Il gel pack sarà fornito in dotazione all'interno del kit solo nei mesi più caldi dell'anno.



5

### SPEDIZIONE

#### Preparazione del pacco e ritiro del corriere:

- Inserire nella scatola la copia originale del consenso informato precedentemente compilato e firmato (vedi step 1).
- Inserire la scatola nella busta del corriere (in dotazione) e sigillare.
- Richiedere tramite il portale al link <http://ngbreast.genomagroup.com> il ritiro del campione compilando tutti i campi richiesti e stampare la lettera di vettura ricevuta via mail (Lettera di vettura non necessaria per i comuni di Roma e di Milano).
- Inserire la lettera di vettura nell'apposita custodia trasparente sulla busta del corriere (La lettera di vettura NON è necessaria per i comuni di Roma e di Milano. Un addetto Genoma ritirerà il kit nella fascia oraria indicata in fase di richiesta ritiro kit sul portale dedicato).
- Attendere il ritiro del campione nelle fasce orarie indicate.



**Nessun campione sprovvisto di copia originale firmata del consenso informato sarà processato**